



# 上

297mm

## サージカルマスク簡易フェイスガード作成手順

材料：A4サイズの厚さ100～150 $\mu$ mの透明ラミネートフィルムなど

この型紙をA4サイズに合わせて印刷（必要に応じて拡大して調整する）

フィルムの下に型紙を合わせ、上方中央と右中央にマスキングテープなどで固定

赤線（左右下方の直線と菱形\*、左右上下曲線部分）をカットして完成

（\* 菱形カットは省略可だが多少ずれやすくなる）

210mm


最初に使用するサージカルマスクを顔に一度フィットさせる。

フィットさせたサージカルマスク耳掛けゴムを左右カット面に通す

ゴムを菱形に入れると装着後ずれ難い：①

フェイスガード付きマスクを装着し再度マスクをフィッティング：②

本フェイスガードは自己の責任において利用して頂けるようお願い致します。

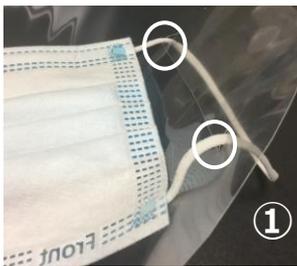

# 下

